

DEZINTAL® extra
Алкохолен раствор за брза дезинфекција на површини
Готов за употреба

Состав

100 g раствор содржи:	
2-пропанол	20,0 g
етанол 96 %	10,0 g
бензалкониум хлорид	0,2 g

Особини и делување

DEZINTAL® extra е алкохолен раствор, готов за употреба, за брза дезинфекција на површини и на опрема. Има широк спектар на микробицидно дејство и брз микробициден ефект, со висок степен на сигурност на сите површини и на опремата. **DEZINTAL® extra** е избалансирана синергична формулација на различни активни материи, без алдехиди, која обезбедува одлично покривање на површините и едноставна примена. Се распрснува во форма на пена и при распрснувањето не се создаваат аеросоли. Распрснатата пена ја прави видлива површината и опремата што се дезинфицира, а алкохолот обезбедува одлично дејство на чистење и на брзо сушење. **DEZINTAL® extra** се употребува на површини и на опрема изработени од материјали отпорни на алкохол, како и од метали, пластика, плексиглас, латекс, акрилно стакло и др.

Бактерицид – вклучувајќи ги и *Staphylococcus aureus*, MRSA, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterococcus hirae*.

Туберкулоцид.

Фунгицид – вклучувајќи ги и *Candida albicans* и *Aspergillus brasiliensis*.

Вируцид – вклучувајќи ги и *HIV*, *HBV*, *HCV*, *Rotavirus*, *Adenovirus*, *Papovavirus/SV40*, *Influenza H1N1/H5N1*, *Influenza A virus*.

DEZINTAL® extra не ја загадува човековата околина и целосно е биолошки разградлив.

Употреба

DEZINTAL® extra се употребува за брза дезинфекција на површини и на медицинска опрема: маси за операција, работни површини, кревети, столови, инкубатори за новороденчиња, возила за прва помош, инвентар, санитарии итн., во болници и во други медицински установи, во медицинска и во стоматолошка практика, во домови за стари и за изнемоштени лица.

Начин на употреба

DEZINTAL® extra е раствор готов за употреба, којшто се распрснува во форма на пена. Се употребува за брза дезинфекција на површини и на опрема со распрснување или со пребришување. При употреба, **DEZINTAL® extra** се распрснува на растојание од 30 cm (40 ml/m²) по површината, се остава да дејствува 5 минути и се пребришува со чиста (неткаена) крпа или **DEZINTAL® extra** се нанесува на чиста (неткаена) крпа, со неа се пребришува површината што треба да се дезинфицира и се остава да се исуши.

<i>За дезинфекција на површини</i>	5 минути
<i>За инактивација на:</i>	
бактерии	1 минута
<i>Candida albicans</i>	1 минута
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	5 минути
<i>Rotavirus, Papovavirus/SV40</i>	0,5 минути
<i>HIV, HBV, HCV, H1N1/H5N1</i>	1 минута

Мерки на претпазливост

DEZINTAL® extra е запалива смеса. Не смее да дојде во контакт со очите. Ако тоа се случи, плакнете ги со вода неколку минути. Отстранете ги контактните леќи доколку се присутни и доколку лесно можете да го направите тоа. Продолжете со плакнење. Побарајте совет од лекар. Ако **DEZINTAL® extra** се проголта, исплакнете ја устата со вода и побарајте совет од лекар. При дезинфекција на електрични апарати претходно проверете дали се исклучени од довод на електрична енергија.

Складирање

Да се чува на места достапни за деца!

DEZINTAL® extra чувајте го во добро затворена оригинална амбалажа, на суво и на проветрено место, на температура од 0°C до +25°C, одвоено од храна и од пијалаци. Чувајте го подалеку од отворен оган, топли површини и од извори на запалување. Преземете соодветни мерки против статичко празнење.

Рок на употреба

1 година.

Напомена: Не го употребувајте **DEZINTAL® extra** по датумот на истекот на рокот на употреба. Датумот на истекот на рокот на употреба се однесува на последниот ден од тој месец.

Рок на употреба по отворање

По отворање, производот **DEZINTAL® extra** употребете го во рок од 28 дена.

Напомена: Еднаш отворениот производ **DEZINTAL® extra** чувајте го во добро затворена оригинална амбалажа, на суво и на проветрено место, на температура од 0°C до +25°C, одвоено од храна и од пијалаци.

Пакување

DEZINTAL® extra е пакуван во

- пластично шише со содржина од 500 ml и од 1000 ml;
- пластичен канистер со содржина од 5 l и од 10 l;
- помошна опрема: распрснувачи-распенувачи за 500 ml и за 1000 ml.

**За информации околу безбедноста при употреба,
Ве молиме користете безбедносен лист.**